

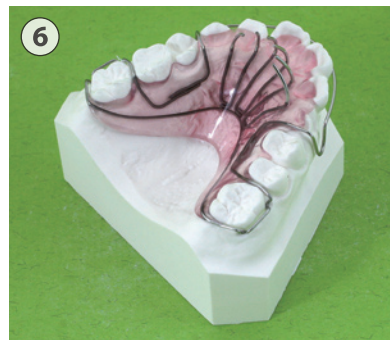
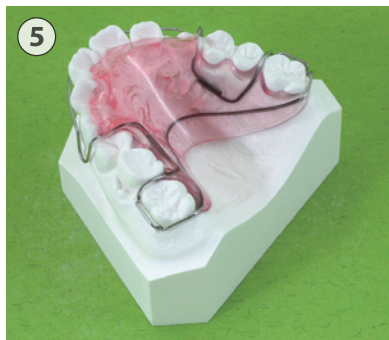
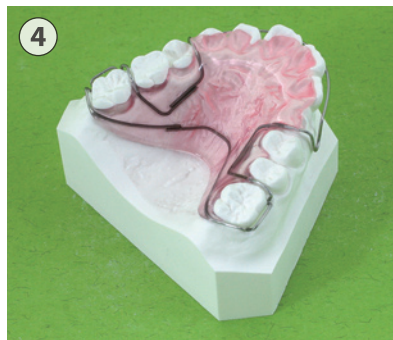


# 矯正装置 (可撤式)

※各装置にスクリーを付加することも可能です。

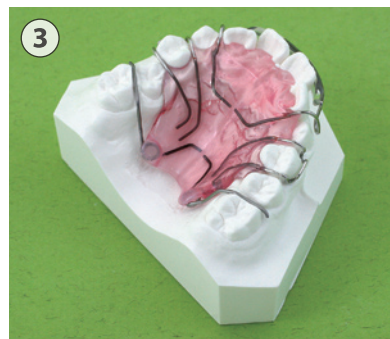

## 矯正装置 (機能式)

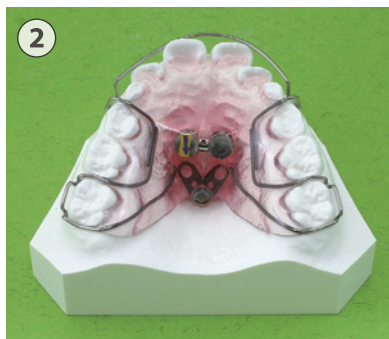


1  
BJA  
(バイトジャンピングアプライアンス)



2  
バイオネーター



3  
アクチバートル(FKO)

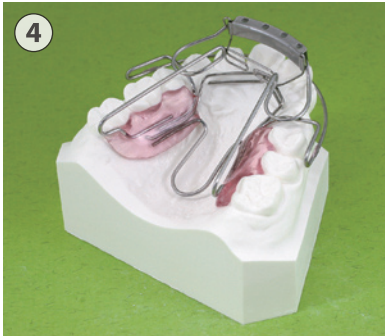

4  
ビムラー



5  
スライディングプレート



6  
リップバンパー

## 矯正装置 (顎内装置)



### BTP (ボンディッドトラクションプレート)

上顎前方牽引時に用いる顎内装置です。  
ⅢA期の側方歯に接着して用いるためバンド印象が不要です。  
咬合挙上と同時に進むため、  
スライディングプレートを併用しなくても被蓋改善が可能です。

8

術前



BTP使用中



2ヶ月後

被蓋改善



## BTP使用方法



1 エッチング



2 ボンディング



3 レジン盛り付け



4 照射



5 咬合調整



6 BTPセット時

Over bite 0～-1mmの位置で咬合採得を行います。側方乳歯に光重合レジンにて接着し、下顎の乳臼歯が装置に均等に当たるように咬合調整します。